

AQUA FUSION PLUS

LE PROPRIETÀ DELL'ACQUA
COME SORGENTE DI
BELLEZZA

Aqua Fusion Plus: Sorgente di Bellezza per il Viso



Il trattamento **AQUA FUSION PLUS** è un'innovativa procedura di «cura» della pelle del viso, assolutamente non invasiva, che integra diverse fasi che permettono di purificare, esfoliare, rimuovere impurità, idratare intensamente e rigenerare la cute.

Ideale per ogni tipo di pelle e perfettamente integrabile con i trattamenti cosmetici Janssen.

Aqua Fusion Plus:

un laboratorio di
bellezza per la pelle
del viso che
combina le migliori
tecnologie alle
proprietà veicolanti
dell'acqua



Software Intuitivo



Protocolli Personalizzati



Sinergie Studiate



Video Educational



Performance Perfette



Cosmetica Integrata



Garanzia 36 mesi



SOFTWARE INTUITIVO

Ogni inestetismo merita attenzioni specifiche, con Aqua Fusion Plus il trattamento non è standardizzato, ma in base all'imperfezione si può proporre, ad ogni cliente, la soluzione migliore con un software semplice che guida l'operatore durante il trattamento.

PROTOCOLLI PERSONALIZZATI

Aqua Fusion Plus propone protocolli di trattamento ampiamente sperimentati su soggetti diversi, metodologie di sicura efficacia per soddisfare la domanda di un utente finale sempre più esigente, dando risultati visibili fin dalla prima applicazione.

SINERGIE AQUA FUSION PLUS

Apparecchiatura multifunzionale progettata per creare sinergie di trattamento, adeguabili ad ogni tipo di pelle ed esigenza in cabina.

- Micro Derma Fusion
- H₂O Solution
- RF + EMS
- Derma Infusion
- Maskin Pro

VIDEO EDUCATIONAL

Studiati per permettere all'operatore di consultare, in ogni momento, i protocolli operativi corretti, al fine di raggiungere le abilità necessarie per offrire e garantire il servizio migliore al cliente.

PERFORMANCE PERFETTE

Protocolli e performance eseguiti rispettando i metodi di lavoro suggeriti (testati più volte per garantirne l'efficacia), esaltano la sinergia fra la tecnologia e i cosmetici specifici, garantendo la massima efficacia del trattamento.

COSMETICA INTEGRATA

Tecnologie all'avanguardia e cosmetici formulati ad hoc, interagiscono perfettamente creando la sinergia ideale per il massimo risultato.


INOLTRE:
analisi della
pelle



Analisi in Macro della Pelle




La macro visualizzazione con telecamera 200x permette una valutazione precisa della condizione epidermica

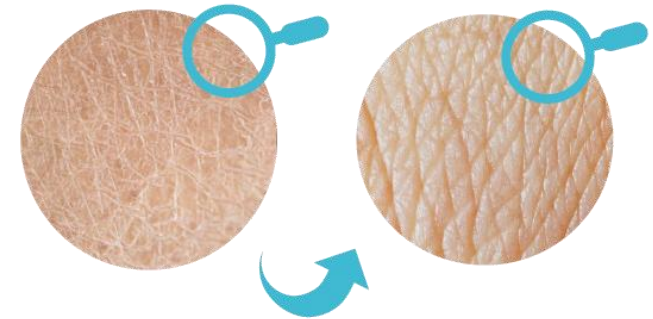

La rilevazione con Macro Cam può essere utilizzata nel pre e nel post trattamento con comparazione finale delle immagini


LE TECNOLOGIE DI AQUA FUSION PLUS

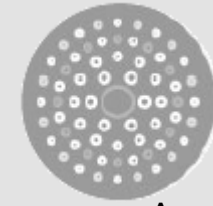

Aqua Derma Abrasion



H2O Infusion

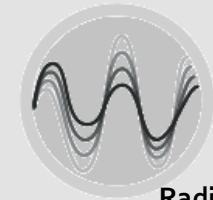

Radiofrequenza + EMS



Derma infusion




Maskin Pro

AQUA FUSION PLUS



**1 fase del
trattamento:
esfoliazione e
rimozione**

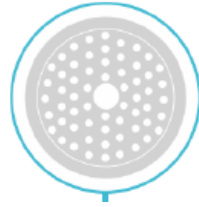

MICRODERMOABRASIONE

La microdermoabrasione con testine diamantate in acciaio utilizza un **manipolo dotato di una testina rivestita di polvere di diamante**.

Durante il trattamento, la testina scorre sulla pelle e, grazie all'azione abrasiva dei microcristalli di diamante, **rimuove lo strato più superficiale di cellule morte (lo strato corneo)**.

Allo stesso tempo, un **sistema di aspirazione (vacuum)** elimina le impurità e stimola la microcircolazione.



ACID PEEL SOLUTION

La soluzione acquosa agisce come un veicolo che facilita il movimento del manipolo e l'infusione delle sostanze funzionali.


La base acquosa permette una distribuzione uniforme dei funzionali esfolianti come AHA, PHA e BHA che facilitano la rimozione delle cellule morte, allentando i legami tra di esse, e delle impurità.

Questo stimola il naturale turnover cellulare e lascia la pelle liscia e luminosa

AQUA FUSION PLUS



microdermoabrasione

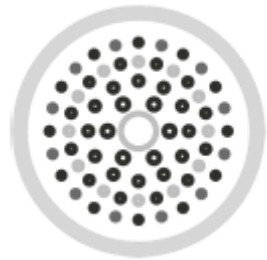

Questa metodica, priva di controindicazioni, è facilmente eseguibile dall'operatore e non è invasiva né traumatica per la pelle.

L'azione del manipolo permette un lavoro uniforme, favorendo un ricambio dello strato più superficiale dell'epidermide e migliorando la permeabilità della cute che favorisce un maggior assorbimento dei prodotti cosmetici

3 testine per i diversi tipi di pelle

TESTINE DIAMANTATE



SENSIBILE

Pelle
sensibile



Riconoscibile da 1
tacca intarsiata



NORMALE

Pelle
normale



Riconoscibile da 2
tacca intarsiata



INSPESSITA

Pelle
inspessita



Riconoscibile da 3
tacca intarsiata



AQUA FUSION PLUS



APS – Acid Peel Solution

Soluzione esfoliante per tutti i tipi di pelle

Soluzione acida a base acquosa, formulata appositamente per l'utilizzo combinato con Aqua Fusion Plus. Questa sinergia con le testine diamantate consente un'esfoliazione profonda e delicata allo tempo stesso.

APS sfrutta le proprietà dei BHA (acido salicilico), AHA (acido glicolico, malico e tartarico) e PHA (polidrossiacidi: gluconolattone) per promuovere un completo turnover cellulare, migliorare la luminosità della pelle, fornire azione antiossidante e ripristinare la barriera cutanea.



AQUA FUSION PLUS



2 fase del
trattamento:
idratazione
profonda



H₂O INFUSION

H₂O Infusion è la seconda importante fase di Aqua Fusion Plus e prevede l'utilizzo dello stesso manipolo della fase esfoliante, ma con la testina piatta e liscia. Questa permetterà l'infusione profonda del prodotto idratante, unita ad un micromassaggio generato dall'azione del vacuum.

Questa fase aiuterà a mantenere la pelle idratata, migliorando elasticità e compattezza.



HS1 HYDRA CALMING SOLUTION

Infinity Aqua Fusion Plus utilizza, per questa seconda fase, prodotti in soluzione acquosa arricchiti di preziosi peptidi che fanno da booster alle sinergie specifiche.

HS1 è formulata con **Hyalumatrix**, una composizione di 5 acidi ialuronici a pesi molecolari differenti, arricchiti con calendula, minerali energizzanti e un potente complesso di tre bacche australiane:

Tasmannia lanceolata (o pepe di Tasmania) - stimola collagene ed elastina, è un potente anti ossidante e un ottimo lenitivo

Kunzea pomifera – antiossidante, idratante e nutriente per la pelle, anti infiammatorio (anche in fenomeni acneici)

Syzygium luehmannii (o riberry) – antiossidante, idratante e rende la pelle morbida e setosa

AQUA FUSION PLUS



H₂O INFUSION



Riequilibrio cutaneo

UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA TESTINA PIATTA




AQUA FUSION PLUS



HS1: Hydra Calming Solution

I PEPTIDI: come funzionano

La nostra pelle è ricca di cellule sulle quali sono presenti strutture chiamate recettori che, una volta legate a un messaggero specifico, o a un particolare peptide, inviano un segnale al nucleo cellulare per innescare una risposta. I peptidi, essendo di piccole dimensioni, vengono assorbiti facilmente e attivano i processi generativi del tessuto.

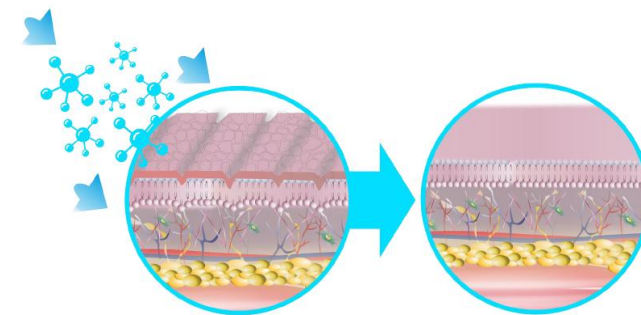

HS1 contiene innovativi peptidi biointelligenti, O-Filler, che sfruttano la tecnologia di rilascio intelligente dell'attivo: hyalumatrix, un pool di un complesso bioattivo di tre bacche australiane ed un complesso multiminerale energizzante.

Ideale per trattare:

- **Disidratazione**
- **Sensibilità cutanea**
- **Invecchiamento cutaneo**
- **Rughe d'espressione**
- **Lassità dei contorni del viso**



AQUA FUSION



2 fase del
trattamento:
purificante
riequilibrante



H2O INFUSION

H2O Infusion è la seconda importante fase di Aqua Fusion e prevede l'utilizzo dello stesso manipolo della fase esfoliante, ma con la testina piatta e liscia. Questa permetterà l'infusione profonda del prodotto purificante riequilibrante, unita ad un micromassaggio generato dall'azione del vacuum.

Questa fase aiuterà a mantenere la pelle luminosa, ossigenata e priva di impurità



RS2 REBALANCE DETOX SOLUTION

Infinity Aqua Fusion Plus utilizza, per questa seconda fase, prodotti in soluzione acquosa arricchiti di preziosi peptidi che fanno da booster alle sinergie specifiche.

RS2 è formulata con 5 estratti vegetali sinergici che riducono le impurità, modulano la produzione di sebo e svolgono un'azione astringente sui pori e un profondo effetto antinfiammatorio:

Bardana – dalle proprietà purificanti, sebo-regolatrici, lenitive, antiossidanti e antiaging

Bixa orellana – pianta tropicale dalle proprietà antiossidanti, lenitive, fotoprotettive e rigeneranti

Amamelide – apprezzato da secoli per le sue proprietà astringenti, lenitive, antinfiammatorie e tonificanti.

Vitis vinifera – potentissima azione antiossidante, rigenerante e protettiva

Boswellia serrata (incenso indiano) – proprietà lenitive, antinfiammatorie, anti-age e rigeneranti.

AQUA FUSION PLUS



H₂O INFUSION



Riequilibrio cutaneo

UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA TESTINA PIATTA




AQUA FUSION PLUS



RS2: Rebalance Detox Solution

I PEPTIDI: come funzionano

La nostra pelle è ricca di cellule sulle quali sono presenti strutture chiamate recettori che, una volta legate a un messaggero specifico, o a un particolare peptide, inviano un segnale al nucleo cellulare per innescare una risposta. I peptidi, essendo di piccole dimensioni, vengono assorbiti facilmente e attivano i processi generativi del tessuto.

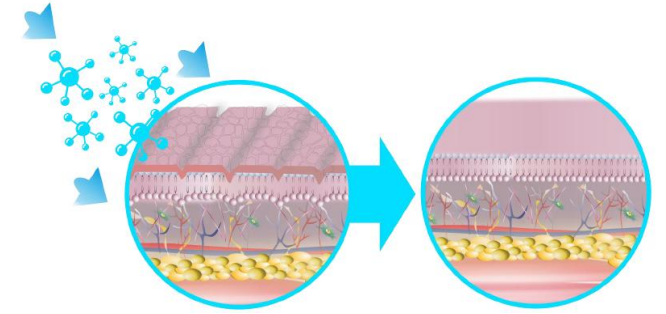

RS2 contiene acetyl tetrapeptide-15, peptide biomimetico che mima i meccanismi naturali della pelle. È noto per la sua azione **lenitiva e calmante**, in particolare per **pelli sensibili, irritate o reattive**. RS2 è arricchita inoltre con 5 estratti che agiscono sinergicamente sulla riduzione della produzione del sebo e svolgono attività purificante e astringente.

Ideale per trattare:

- Pelli sensibili e irritabili
- Pelli impure o acneiche



AQUA FUSION PLUS



**3 fase del
trattamento:
rigenerare**



La radiofrequenza abbinata alla stimolazione muscolare è un'innovativa metodica che sfrutta i poteri della Diatermia, quindi di rigenerazione tessuti, in abbinamento con l'azione di micro-contrazione muscolare per il rassodamento e la definizione dei contorni del viso.

Utilizza sinergicamente la Radiofrequenza Bipolare e l'EMS (Electrical Muscle Stimulation) con l'obiettivo di favorire un processo di tonificazione della pelle del viso attraverso un riscaldamento selettivo delle fibre di collagene ed una stimolazione della muscolatura facciale che determina una migliore capacità di ancorare le stesse fibre.



AQUA FUSION PLUS



**3 fase del
trattamento:
rigenerare**



RADIOFREQUENZA + EMS (elettrostimolazione muscolare)

È consigliabile partire sempre con solo la RF per scaldare bene il tessuto e poi alzare anche la potenza dell'EMS non oltre i 20 Hz


L'abbinamento cosmetico ideale in questa fase è con le maschere in TNT o in biocellulosa di Jansenn, secondo le esigenze specifiche.

EFFETTI DELLA FASE RIGENERANTE:

- Stimolazione del microcircolo e incremento della microcircolazione
- Stimolazione dell'idratazione e la rivitalizzazione della cute
- Modificazione della temperatura del tessuto e del metabolismo
- Effetto lifting immediato per la contrazione delle fibre collagene
- Effetto lifting nel medio termine per la rigenerazione di nuovo collagene
- Stimolazione dei muscoli facciali in una sorta di «ginnastica» tonificante



AQUA FUSION PLUS

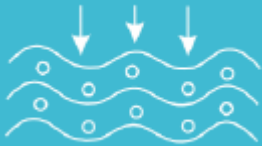


**4 fase del
trattamento:
nutrimento
intensivo**




DERMAINFUSION - Elettroporazione

Prima di Derma Infusion

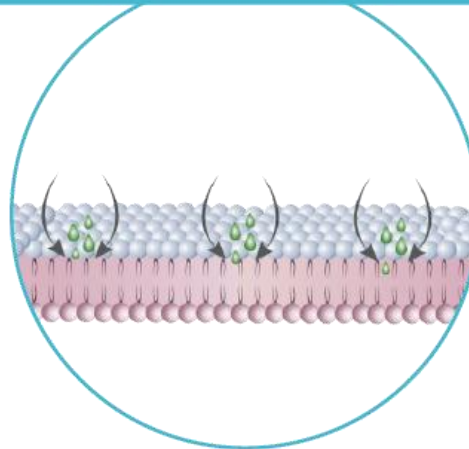

Formazione di Elettropori

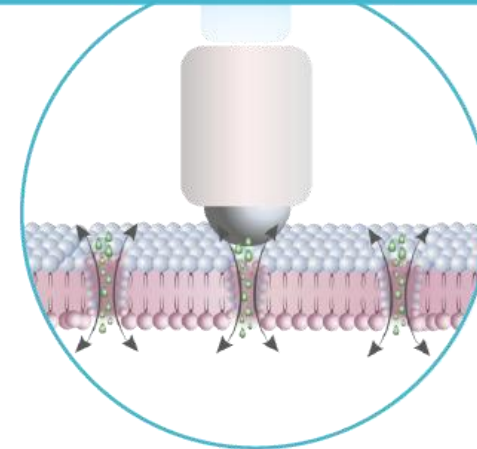


L'elettroporazione genera speciali correnti dinamiche di forme d'onda e frequenze diverse. Questi impulsi causano la formazione temporanea di elettropori nella membrana cellulare cutanea, aumentando la permeabilità dei tessuti e permettendo la penetrazione e il trasporto di principi attivi specifici, anche ad alto peso molecolare. Questa metodica è di grande supporto in estetica professionale per la sua capacità di aumentare la permeabilità dei tessuti cutanei alle sostanze cosmetiche, potenziando i risultati immediati e mantenendoli più a lungo.

AQUA FUSION PLUS



**4 fase del
trattamento:
nutrimento
intensivo**

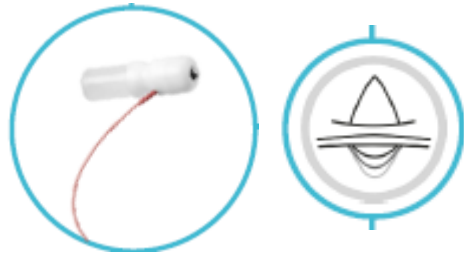

DERMAINFUSION - Elettroporazione

DERMAINFUSION è consigliata con tutte le fiale e i sieri Janssen, da scegliere secondo le necessità del cliente.

Si consiglia di applicare il prodotto selezionato sulla zona da trattare e successivamente passare in modo lento il manipolo Dermainfusion sulla zona specifica.

Per un risultato ottimale si consiglia un tempo di circa 5 minuti per ogni ruga.



AQUA FUSION PLUS



**5 fase del
trattamento:
Booster**



MASKIN PRO

Maskin Pro permette di completare il trattamento in totale relax, scegliendo tra varie luci a LED colorate che irradiano la pelle del viso per 10-15 minuti, offrendo anche un trattamento finale di benessere. La luce e il leggero calore irradiato permettono al siero o alla maschera in gel (trasparente) Janssen di agire in profondità, fornendo un intenso effetto nutriente alla pelle.

Questa combinazione innovativa assicura una penetrazione più profonda delle sostanze funzionali, ottimizzando i risultati e lasciando la pelle visibilmente rigenerata e luminosa



AQUA FUSION PLUS



**5 tase del
trattamento:
I COLORI**



MASKIN PRO: ROSSO (620-670 nm)

Effetti anti-infiammatori e stimolo del collagene (fotobiomodulazione)

Usata nei trattamenti LED per:

- ridurre infiammazione,
- stimolare fibroblasti,
- migliorare texture e fine rugosità,
- accelerare la guarigione e la rigenerazione

Si consiglia l'esposizione alla luce rossa 2 o 3 volte alla settimana per 10-15 minuti, per 8-12 settimane.

In sinergia con un siero specifico si può ridurre la frequenza.

ANTI - AGING



AQUA FUSION PLUS



5 tase del
trattamento:
I COLORI



MASKIN PRO: BLU (415-450 nm)

Efficacia scientificamente dimostrata per l'acne

- Ha un'azione **antibatterica**: uccide *Propionibacterium acnes* (ora *Cutibacterium acnes*), responsabile dell'acne infiammatoria.
- Penetra poco nella pelle, quindi è utile sulle lesioni superficiali

Si consiglia l'esposizione alla luce blu 3 o 5 volte alla settimana (secondo la gravità dell'inestetismo) per 10-20 minuti, per 4-8 settimane.

In sinergia con un siero specifico si può ridurre la frequenza.

PELLE IMPURA



AQUA FUSION PLUS



**5 tase del
trattamento:
I COLORI**



MASKIN PRO: GIALLO (570-620 nm)

**Ottima per arrossamenti, rosacea e
stimolo linfatico**

Ha una penetrazione intermedia, utile
per:

- ridurre eritema,
- migliorare sensibilità e rossori,
- favorire il drenaggio

Si consiglia l'esposizione alla luce gialla 2
o 3 volte alla settimana per 10-20 minuti,
per 4-6 settimane.

In sinergia con un siero specifico si può
ridurre la frequenza.

PELLE SENSIBILE



AQUA FUSION PLUS



**5 tase del
trattamento:
I COLORI**



MASKIN PRO: VERDE (520-560 nm)

Riduzione della pigmentazione in alcune condizioni

Può interferire con la melanina e viene studiata per trattare:

- iperpigmentazioni superficiali,
- melasma (risultati moderati).

Si consiglia l'esposizione alla luce verde 2 o 3 volte alla settimana per 10-20 minuti, per 4-8 settimane.

In sinergia con un siero specifico si può ridurre la frequenza.

PELLE IPERPIGMENTATA



AQUA FUSION PLUS



**5 tase del
trattamento:
I COLORI**



MASKIN PRO: VIOLA (280-450 nm)

Acne moderata e pelle irritata

- Unisce l'azione antibatterica (blu) con quella antinfiammatoria (rosso).

Si consiglia l'esposizione alla luce viola 2 o 3 volte alla settimana per 10-15 minuti, per 4-8 settimane.

In sinergia con un siero specifico si può ridurre la frequenza.

PELLE IRRITATA



AQUA FUSION PLUS



**5 fase del
trattamento:
I COLORI**



MASKIN PRO: CIANO (490-520 nm, è una miscela di Blu e Verde)

**È l'ideale per pelli «disomogenee»
lievi**

- Unisce l'azione antibatterica (blu) con quella depigmentante (verde)

Si consiglia l'esposizione alla luce ciano 2 o 3 volte alla settimana per 10-15 minuti, per 4-8 settimane.

In sinergia con un siero specifico si può ridurre la frequenza.


**PELLE CON IMPURITÀ E
MACCHIE LEGGERE**



AQUA FUSION PLUS




5 tase del
trattamento:
I COLORI

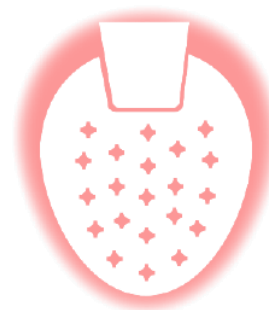

NB: alcuni principi sulla fotobiostimolazione

1. Una volta ottenuti i risultati è necessario un **mantenimento** costante se non si vuole assistere ad una veloce regressione. Mantenimento che si può fare ogni 15 gg o mensilmente se abbinato ad un cosmetico specifico.
2. Esistono problemi di **sovradosaggi**: una dose troppo alta può avere effetto nullo o addirittura inibitorio
3. Sedute quotidiane non migliorano i risultati per la maggioranza degli inestetismi

I PROTOCOLLI AQUA FUSION PLUS

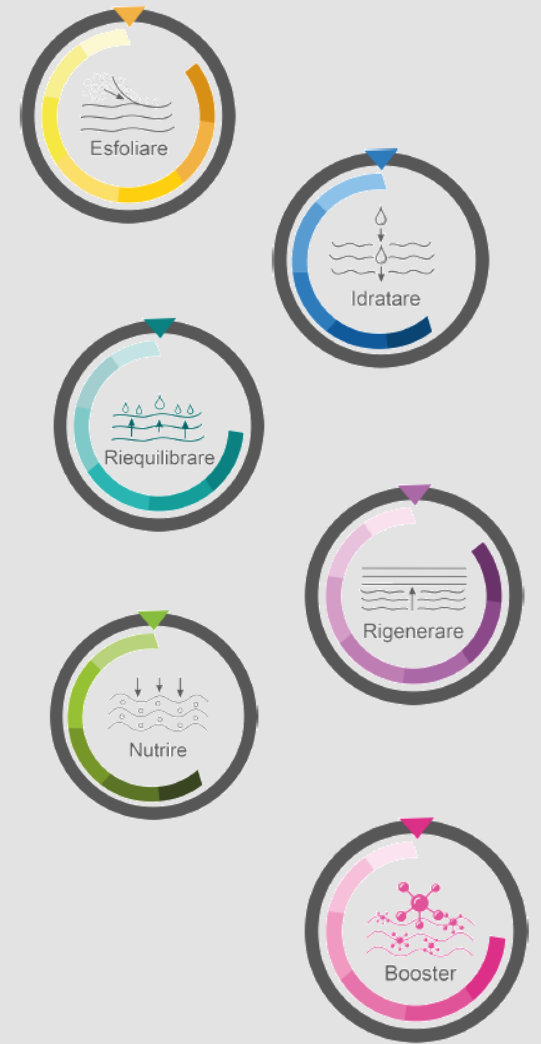


AQUA FUSION PLUS



Protocolli

HYDRA PEEL BASIC

Protocollo di preparazione e potenziamento di qualsiasi trattamento o percorso in cabina dedicato al viso

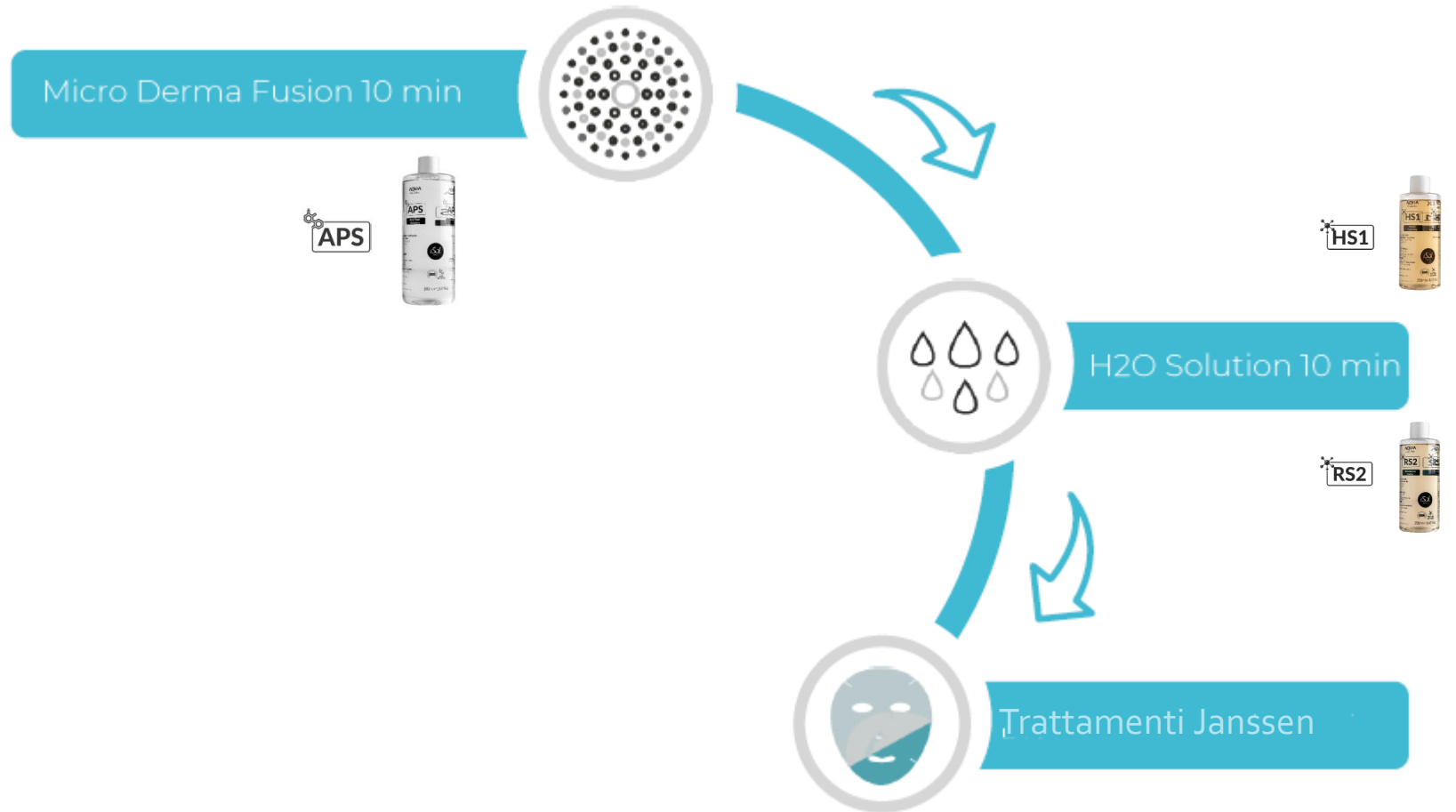


AQUA FUSION PLUS



Protocolli

HYDRA PEEL DERMAL

Protocollo di pulizia, rinnovamento e nutrimento

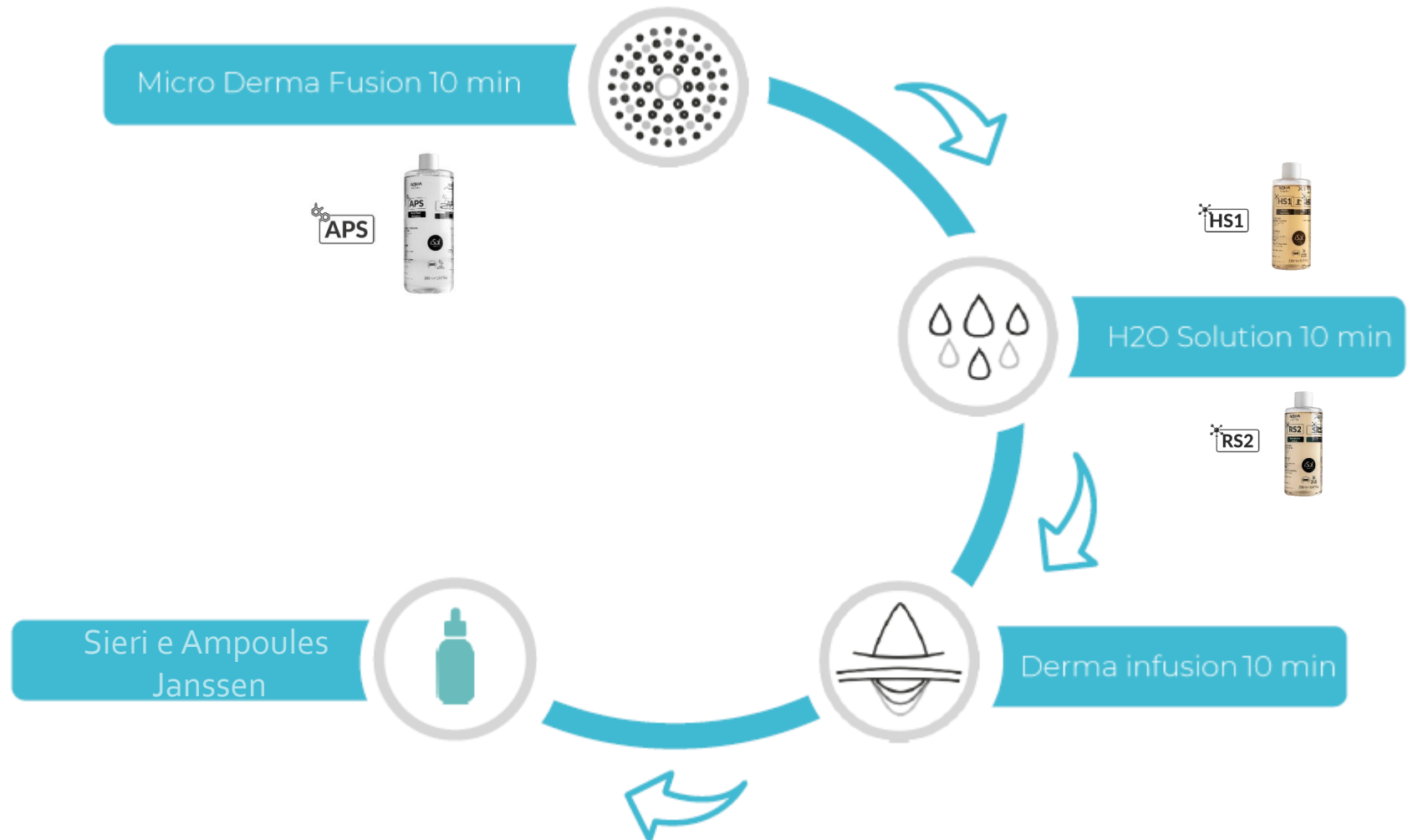


AQUA FUSION PLUS



Protocolli

HYDRA PEEL NUTRI LIFT PRO

Protocollo di pulizia, rinnovamento, riequilibrio e rigenerazione cutanea

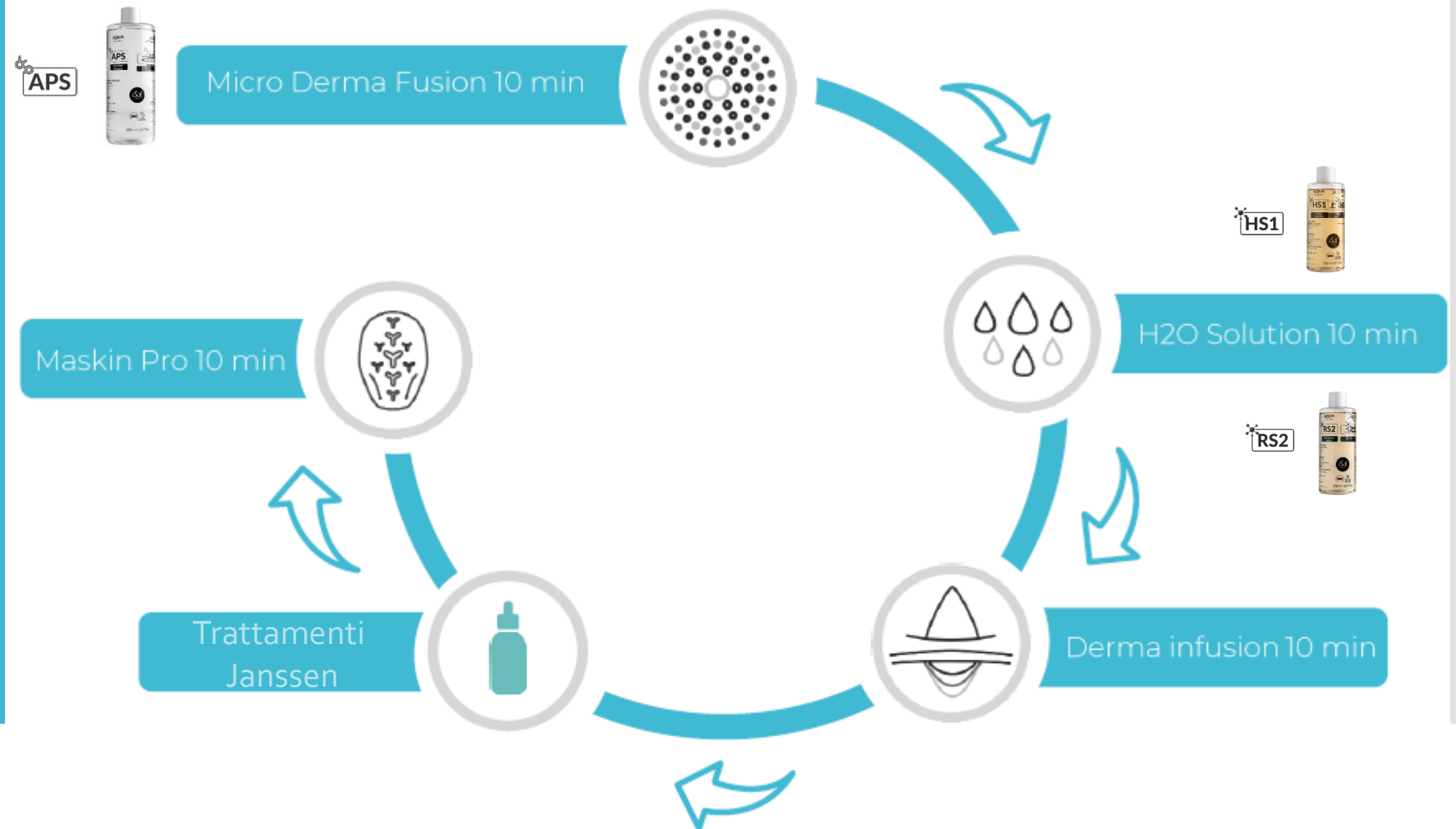


AQUA FUSION PLUS



Protocolli

HYDRA SKIN CLEAN

Protocollo specifico di pulizia e rinnovamento

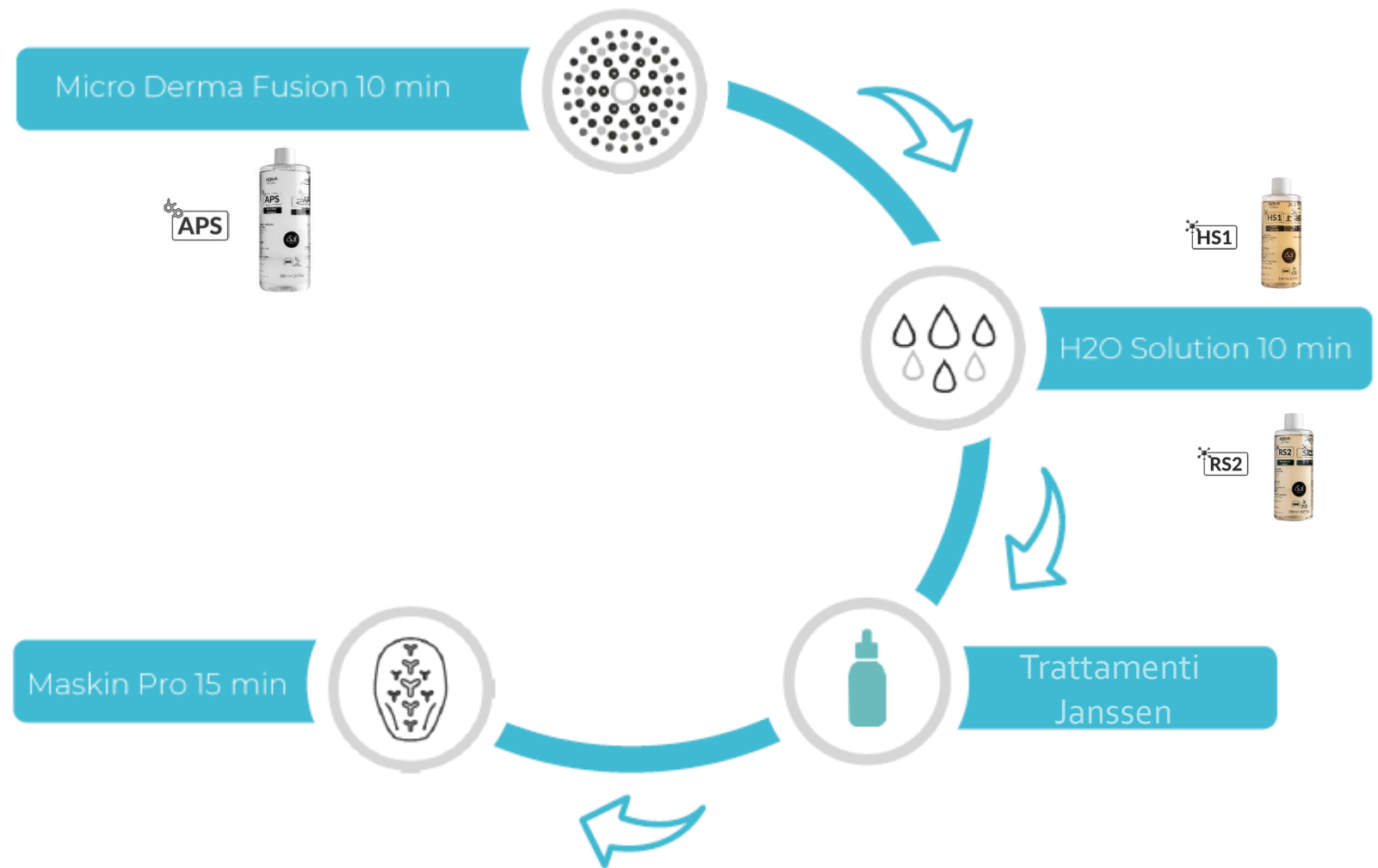


AQUA FUSION PLUS



Protocolli

HYDRA DERMO NUTRI SKIN

Protocollo specifico di pulizia, rinnovamento, rigenerazione e nutrimento profondo

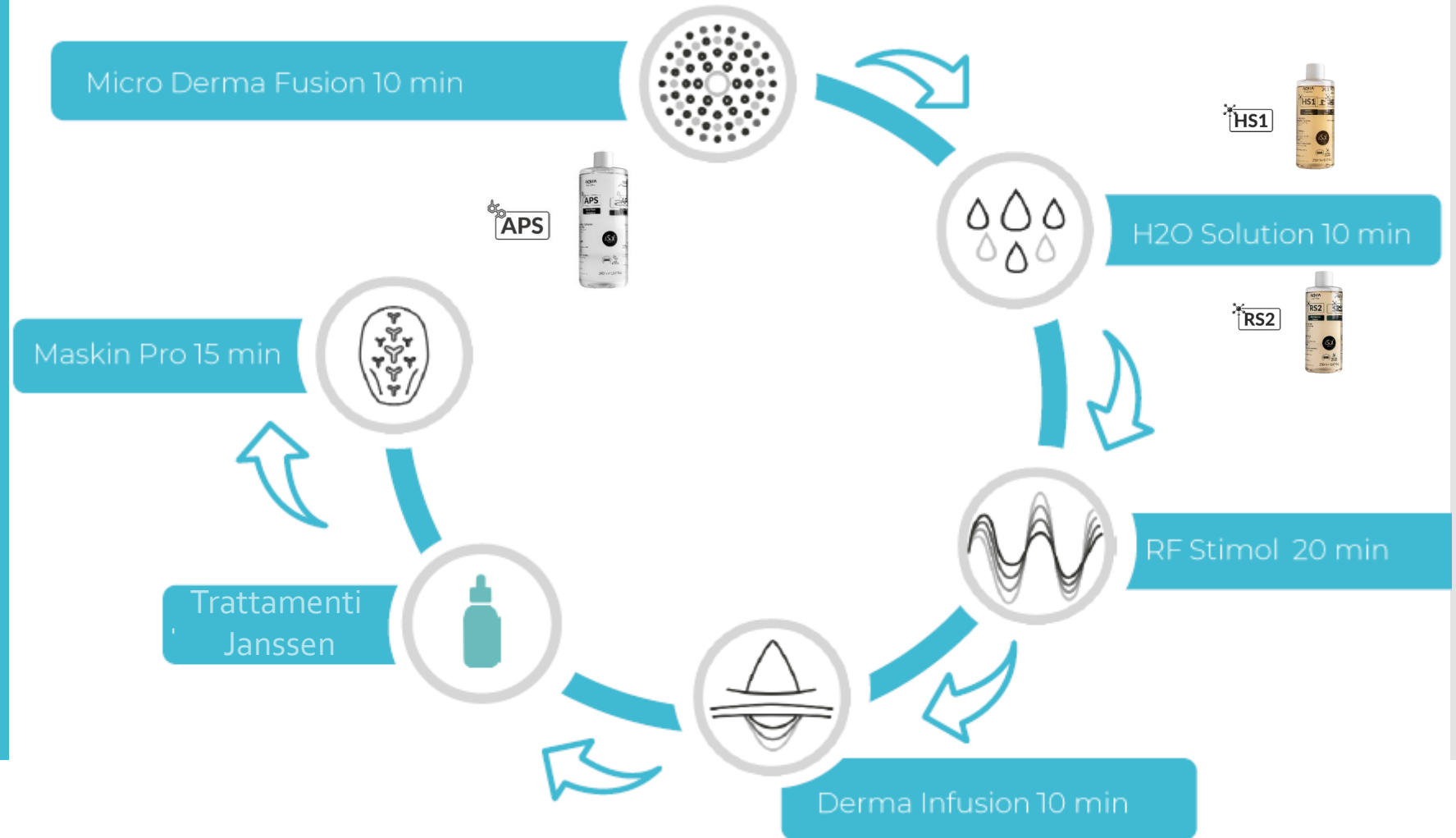

Per quali
inestetismi è
adatta
**AQUA
FUSION
PLUS**

AQUA FUSION PLUS è una innovativa tecnologia che si abbina perfettamente a tutti i trattamenti cosmetici professionali per il viso.

- Prepara la pelle
- Elimina le impurità e le cellule morte in eccesso
- Rende la pelle più permeabile alle sostanze funzionali specifiche
- Stimola la pelle alla auto-rigenerazione
- Veicola in profondità le sostanze funzionali specifiche
- Rigenera e lifta la pelle del viso
- Stimola la muscolatura del viso tonificandola
- Esalta i risultati dei trattamenti cosmetici viso Janssen specifici
- Favorisce tutti i processi metabolici cutanei rallentando i fenomeni di invecchiamento, mantenendo una pelle fresca e giovane.

AQUA FUSION PLUS è dunque adatta a **qualsiasi tipo di pelle** e a **qualsiasi inestetismo** si voglia trattare. Dà risultati visibili fin dalla prima seduta

I punti di forza di AQUA FUSION PLUS

- **Tecnologia innovativa, efficace su tutti gli inestetismi del viso**
- **Facile da utilizzare e piacevole da ricevere**
- **Una sinergia di tecnologie all'avanguardia racchiuse in un'unica apparecchiatura** (ingombro limitato e «risparmio economico»)
- **Si utilizza in modo sinergico ai trattamenti cosmetici** (ottimizzazione ed esaltazione dei risultati)
- La **molteplicità di combinazioni** delle diverse tecnologie, permette di trovare sempre il programma perfetto per ogni esigenza del cliente, sia estetica sia economica
- **Ottimo sostituto della fastidiosa «spremitura manuale» dei comedoni** (trattamento piacevole e che non lascia nessun segno di arrossamento sul viso)