

interbeauty
RICERCA E TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

AQUA FUSION

LE PROPRIETÀ DELL'ACQUA
COME SORGENTE DI
BELLEZZA

Aqua Fusion: Sorgente di Bellezza per il Viso



Il trattamento **AQUA FUSION** è un'innovativa procedura di «cura» della pelle del viso, assolutamente non invasiva, che integra diverse fasi che permettono di purificare, esfoliare, rimuovere impurità e idratare intensamente.

Ideale per ogni tipo di pelle e perfettamente integrabile con i trattamenti cosmetici Janssen.

Aqua Fusion:

un laboratorio di bellezza per la pelle del viso che combina le migliori tecnologie alle proprietà veicolanti dell'acqua



SOFTWARE INTUITIVO

Ogni inestetismo merita attenzioni specifiche, con Aqua Fusion il trattamento non è standardizzato, ma in base all'imperfezione si può proporre, ad ogni cliente, la soluzione migliore con un software semplice che guida l'operatore durante il trattamento.

PROTOCOLLI PERSONALIZZATI

Aqua Fusion propone protocolli di trattamento ampiamente sperimentati su soggetti diversi, metodologie di sicura efficacia per soddisfare la domanda di un utente finale sempre più esigente, dando risultati visibili fin dalla prima applicazione.

VIDEO EDUCATIONAL

Studiati per permettere all'operatore di consultare, in ogni momento, i protocolli operativi corretti, al fine di raggiungere le abilità necessarie per offrire e garantire il servizio migliore al cliente.

PERFORMANCE PERFETTE

Protocolli e performance eseguiti rispettando i metodi di lavoro suggeriti (testati più volte per garantirne l'efficacia), esaltano la sinergia fra la tecnologia e i cosmetici specifici, garantendo la massima efficacia del trattamento.

SINERGIE STUDIATE PER AQUA FUSION

Micro Derma Fusion
H2O Solution
Trattamenti Janssen specifici

COSMETICA INTEGRATA

Tecnologie all'avanguardia e cosmetici formulati ad hoc, interagiscono perfettamente creando la sinergia ideale per il massimo risultato.


INOLTRE:
analisi della
pelle



Analisi in Macro della Pelle




La macro visualizzazione con telecamera 200x permette una valutazione precisa della condizione epidermica

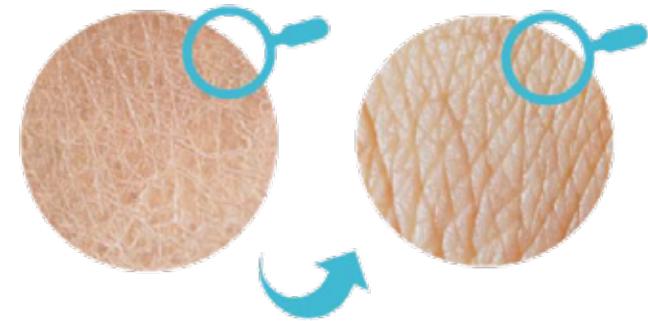

La rilevazione con Macro Cam può essere utilizzata nel pre e nel post trattamento con comparazione finale delle immagini

LE TECNOLOGIE DI AQUA FUSION

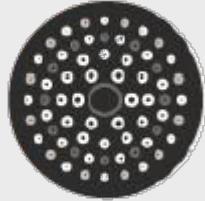

Aqua Derma Abrasion




H₂O Infusion

AQUA FUSION



**1 fase del
trattamento:
esfoliazione e
rimozione**

MICRODERMOABRASIONE

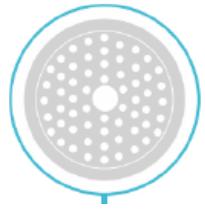

La microdermoabrasione con testine diamantate in acciaio utilizza un **manipolo dotato di una testina rivestita di polvere di diamante**.

Durante il trattamento, la testina scorre sulla pelle e, grazie all'azione abrasiva dei microcristalli di diamante, **rimuove lo strato più superficiale di cellule morte (lo strato corneo)**. Allo stesso tempo, un **sistema di aspirazione (vacuum)** elimina le impurità e stimola la microcircolazione.



ACID PEEL SOLUTION

La soluzione acquosa agisce come un veicolo che facilita il movimento del manipolo e l'infusione delle sostanze funzionali.


La base acquosa permette una distribuzione uniforme dei funzionali esfolianti come AHA, PHA e BHA che facilitano la rimozione delle cellule morte, allentando i legami tra di esse, e delle impurità.

Questo stimola il naturale turnover cellulare e lascia la pelle liscia e luminosa

AQUA FUSION



microdermoabrasione

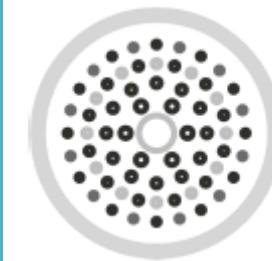

Questa metodica, priva di controindicazioni, è facilmente eseguibile dall'operatrice e non è invasiva né traumatica per la pelle.

L'azione del manipolo permette un lavoro uniforme, favorendo un ricambio dello strato più superficiale dell'epidermide e migliorando la permeabilità della cute che favorisce un maggior assorbimento dei prodotti cosmetici

3 testine per i diversi tipi di pelle

TESTINE DIAMANTATE



Pelle
sensibile



Riconoscibile da 1
tacca intarsiata



Pelle
normale



Riconoscibile da 2
tacche intarsiata



Pelle
inspessita



Riconoscibile da 3
tacche intarsiata



AQUA FUSION



APS – Acid Peel Solution

Soluzione esfoliante per tutti i tipi di pelle

Soluzione acida a base acquosa, formulata appositamente per l'utilizzo combinato con Aqua Fusion. Questa sinergia con le testine diamantate consente un'esfoliazione profonda e delicata allo stesso tempo.


APS sfrutta le proprietà dei BHA (Acido Salicilico), AHA (acido glicolico, malico e tartarico) e PHA (polidrossiacidi: gluconolattone) per promuovere un completo turnover cellulare, migliorare la luminosità della pelle, fornire azione antiossidante e ripristinare la barriera cutanea.



AQUA FUSION



**2 fase del trattamento:
idratazione profonda**

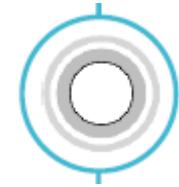

H2O INFUSION

H2O Infusion è la seconda importante fase di Aqua Fusion e prevede l'utilizzo dello stesso manipolo della fase esfoliante, ma con la testina piatta e liscia. Questa permetterà l'infusione profonda del prodotto idratante, unita ad un micromassaggio generato dall'azione del vacuum.

Questa fase aiuterà a mantenere la pelle idratata, migliorando elasticità e compattezza.



HS1 HYDRA CALMING SOLUTION

Infinity Aqua Fusion utilizza, per questa seconda fase, prodotti in soluzione acquosa arricchiti di preziosi peptidi che fanno da booster alle sinergie specifiche.

HS1 è formulata con Hyalumatrix, una composizione di 5 acidi ialuronici a pesi molecolari differenti, arricchiti con calendula, minerali energizzanti e un potente complesso di tre bacche australiane:

Tasmannia lanceolata (o pepe di Tasmania) - stimola collagene ed elastina, è un potente anti ossidante e un ottimo lenitivo

Kunzea pomifera – antiossidante, idratante e nutriente per la pelle, anti infiammatorio (anche in fenomeni acneici)

Syzygium luehmannii (o riberry) – antiossidante, idratante e rende la pelle morbida e setosa

AQUA FUSION



H₂O INFUSION



Riequilibrio cutaneo

UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA TESTINA PIATTA



AQUA FUSION



HS1: Hydra Calming Solution




HS1 contiene innovativi peptidi biointelligenti, O-Filler, che sfruttano la tecnologia di rilascio intelligente dell'attivo: hyalumatrix, un pool di un complesso bioattivo di tre bacche australiane ed un complesso multiminerale energizzante.

Ideale per trattare:

- Disidratazione
- Sensibilità cutanea
- Invecchiamento cutaneo
- Rughe d'espressione
- Lassità dei contorni del viso

I PEPTIDI: come funzionano


La nostra pelle è ricca di cellule sulle quali sono presenti strutture chiamate recettori che, una volta legate a un messaggero specifico, o a un particolare peptide, inviano un segnale al nucleo cellulare per innescare una risposta. I peptidi, essendo di piccole dimensioni, vengono assorbiti facilmente e attivano i processi generativi del tessuto.

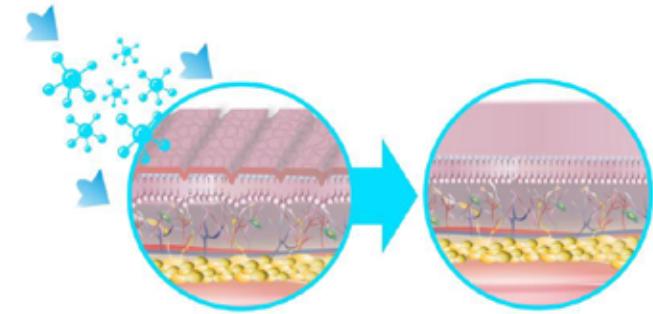

AQUA FUSION



**2 fase del trattamento:
purificante
riequilibrante**

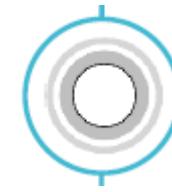

H2O INFUSION

H2O Infusion è la seconda importante fase di Aqua Fusion e prevede l'utilizzo dello stesso manipolo della fase esfoliante, ma con la testina piatta e liscia. Questa permetterà l'infusione profonda del prodotto purificante riequilibrante, unita ad un micromassaggio generato dall'azione del vacuum.

Questa fase aiuterà a mantenere la pelle luminosa, ossigenata e priva di impurità



RS2 REBALANCE DETOX SOLUTION

Infinity Aqua Fusion Plus utilizza, per questa seconda fase, prodotti in soluzione acquosa arricchiti di preziosi peptidi che fanno da booster alle sinergie specifiche.

RS2 è formulata con 5 estratti vegetali sinergici che riducono le impurità, modulano la produzione di sebo e svolgono un'azione astringente sui pori e un profondo effetto antinfiammatorio:

Bardana – dalle proprietà purificanti, sebo-regolatrici, lenitive, antiossidanti e antiaging

Bixa orellana – pianta tropicale dalle proprietà antiossidanti, lenitive, fotoprotettive e rigeneranti

Amamelide – apprezzato da secoli per le sue proprietà astringenti, lenitive, antinfiammatorie e tonificanti.

Vitis vinifera – potentissima azione antiossidante, rigenerante e protettiva

Boswellia serrata (incenso indiano) – proprietà lenitive, antinfiammatorie, anti-age e rigeneranti.

AQUA FUSION



H₂O INFUSION



Riequilibrio cutaneo

UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA TESTINA PIATTA



AQUA FUSION



RS2: Rebalance Detox Solution




RS2 contiene acetyl tetrapeptide-15, peptide biomimetico che mima i meccanismi naturali della pelle. È noto per la sua azione **lenitiva e calmante**, in particolare per pelli **sensibili, irritate o reattive**. RS2 è arricchita inoltre con 5 estratti che agiscono sinergicamente sulla riduzione della produzione del sebo e svolgono attività purificante e astringente.

Ideale per trattare:


- Pelli sensibili e irritabili
- Pelli impure o acneiche

I PEPTIDI: come funzionano

La nostra pelle è ricca di cellule sulle quali sono presenti strutture chiamate recettori che, una volta legate a un messaggero specifico, o a un particolare peptide, inviano un segnale al nucleo cellulare per innescare una risposta. I peptidi, essendo di piccole dimensioni, vengono assorbiti facilmente e attivano i processi generativi del tessuto.

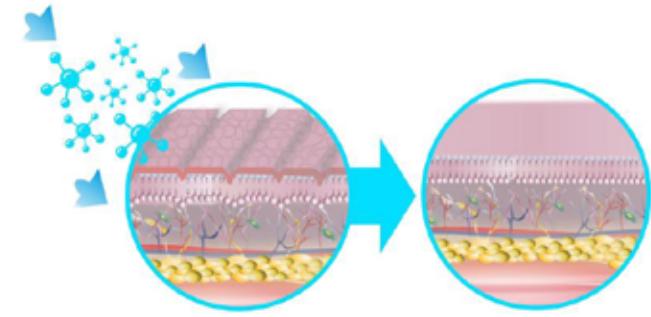

IL PROTOCOLLO AQUA FUSION

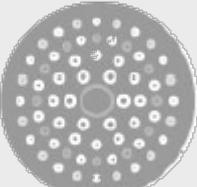

STEP 1



STEP 2



STEP 3


AQUA FUSION



Protocolli

HYDRA PEEL BASIC

Protocollo di preparazione e potenziamento di qualsiasi trattamento o percorso in cabina, dedicato al viso

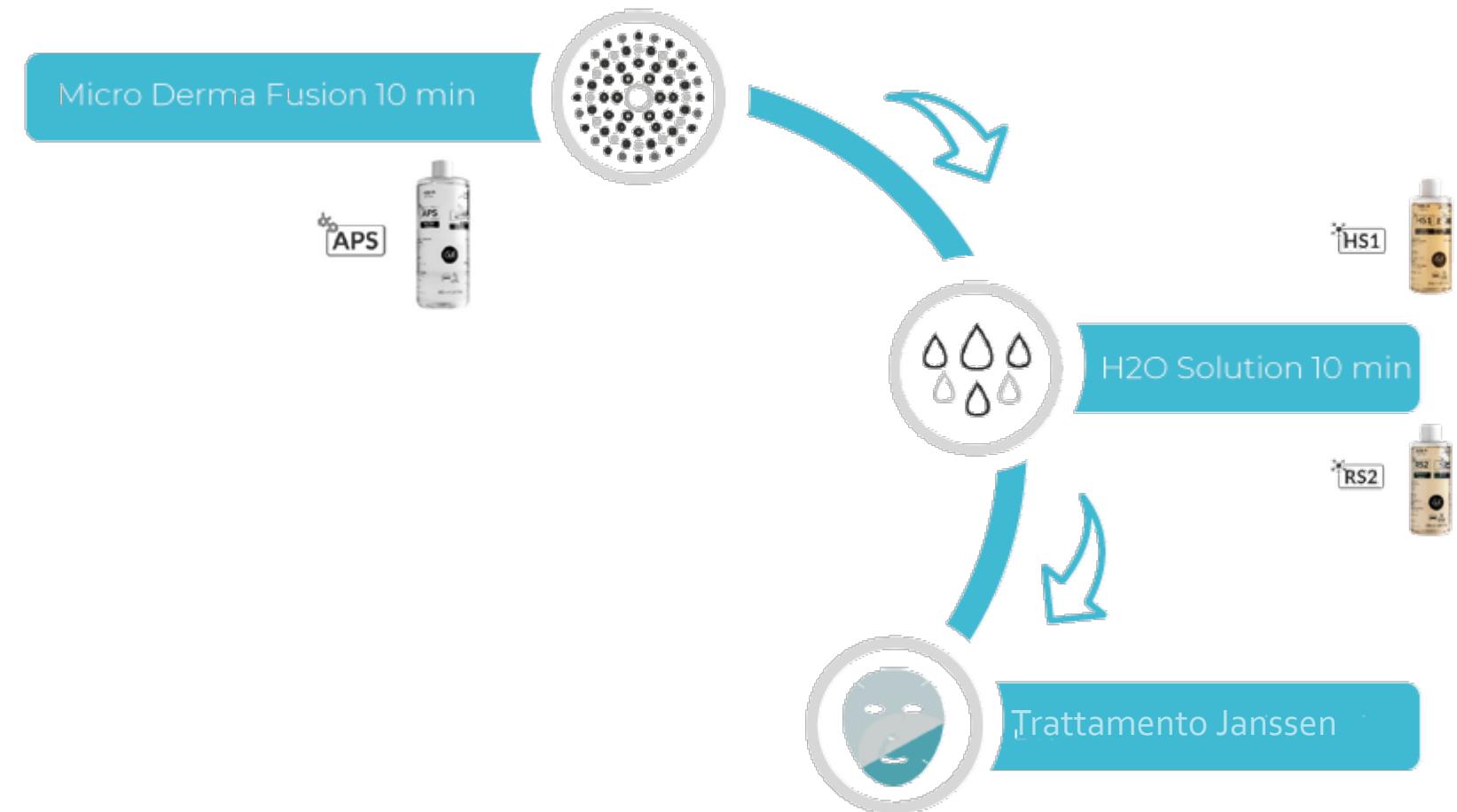

Per quali inestetismi è adatta AQUA FUSION

AQUA FUSION è una innovativa tecnologia che si abbina perfettamente a tutti i trattamenti cosmetici professionali per il viso.

- Prepara la pelle
- Elimina le impurità e le cellule morte in eccesso
- Rende la pelle più permeabile alle sostanze funzionali specifiche
- Stimola la pelle alla auto-rigenerazione
- Esalta i risultati dei trattamenti cosmetici viso Janssen specifici
- Favorisce tutti i processi metabolici cutanei rallentando i fenomeni di invecchiamento, mantenendo una pelle fresca e giovane.

AQUA FUSION è dunque adatta a qualsiasi tipo di pelle e a qualsiasi inestetismo si voglia trattare

Usata senza abbinamento con il trattamento cosmetico è ideale per ossigenare la pelle e idratarla in profondità con un risultato visibile di luminosità e uniformità dell'incarnato: ottima per un intervento veloce prima di un evento importante (può essere la base ideale per un make up professionale)

I punti di forza di AQUA FUSION

- **Tecnologia innovativa, efficace su tutti gli inestetismi del viso**
- **Facile da utilizzare e piacevole da ricevere**
- **Una sinergia di tecnologie racchiuse in un'unica apparecchiatura**
(ingombro limitato e risparmio economico)
- **Si utilizza in modo sinergico ai trattamenti cosmetici**
(ottimizzazione ed esaltazione dei risultati)
- **Ottimo sostituto della fastidiosa «spremitura manuale» dei comedoni** (trattamento piacevole e che non lascia nessun segno di arrossamento sul viso)