

# ENDO TECH PRO

TECNOLOGIA MULTIFUNZIONALE PER IL  
MODELLAMENTO CORPO E VISO

# Tecnologia multifunzione


- ▶ Un sistema integrato con 4 diversi manipoli: 2 viso e 2 corpo
- ▶ 2 manipoli a sfere rotanti che simulano il massaggio tapping per viso e corpo
- ▶ 2 manipoli «rotanti» con aspirazione che simulano un massaggio connettivale profondo per viso e corpo
- ▶ Azioni sinergiche per risultati visibili fin dalle prime applicazioni
- ▶ Possibilità di personalizzare il percorso di trattamenti per ottenere risultati mirati



# LE TECNOLOGIE DI **ENDO TECH PRO**



# MANIPOLO SFERE CORPO e VISO

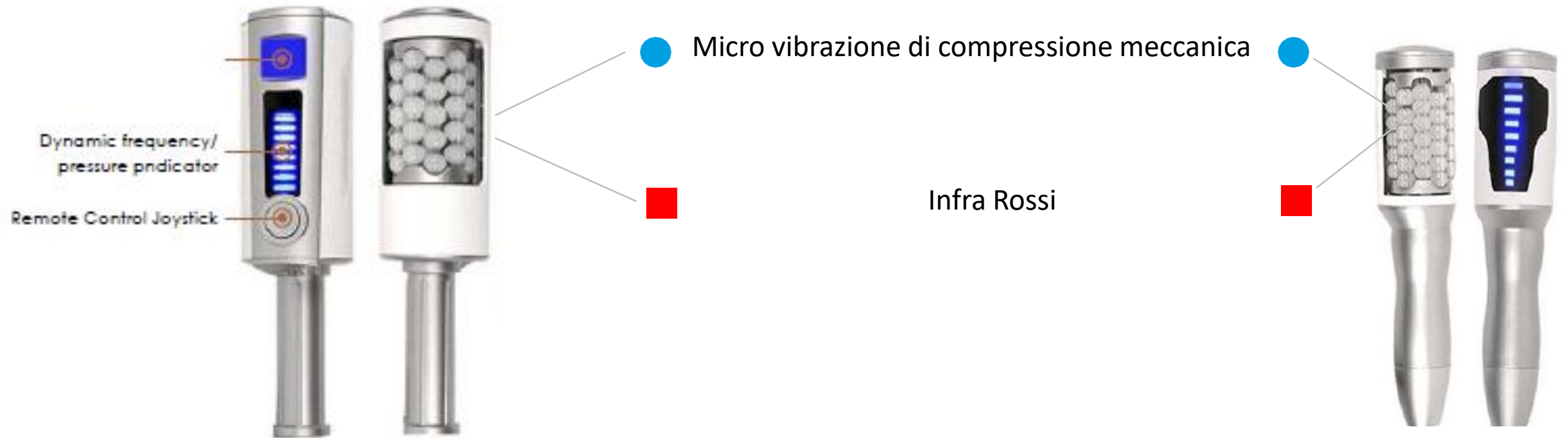

La «vibrazione» data dal movimento push-pull delle sfere (verso ds o verso sn), mima la funzione del massaggio Tapping Estetico, eseguito con **percussioni leggere, ritmate e superficiali** che hanno una funzione **stimolante, tonificante e rivitalizzante**.

✂ **Stimolazione cutanea:** attiva i **meccanocettori della pelle**, migliora la **reattività dei tessuti**, favorisce il rinnovamento cellulare, la pelle appare più “viva” e luminosa.

✂ **Microcircolazione:** induce una vasodilatazione superficiale. Aumenta l’apporto di: ossigeno e nutrienti. Favorisce l’eliminazione delle tossine. Effetto immediato: pelle rosata e tonica.

✂ **Tono muscolare superficiale:** stimola i muscoli cutanei e sottocutanei. Migliora: compattezza, tonicità e sostegno dei tessuti. Utile su zone soggette a rilassamento.

✂ **Sistema nervoso:** ha un effetto rivitalizzante ed energizzante. Dona una sensazione di “risveglio” senza stress.





**Contemporaneamente al massaggio con le sfere, vengono erogati gli Infra rossi per sviluppare un'azione sinergica.**

L' IR è una porzione dello spettro elettromagnetico con lunghezze d'onda tra circa 780 e 2500 nm ed è usato in alcuni trattamenti estetici non invasivi per migliorare l'aspetto della pelle e degli inestetismi corporei.


**Miglioramento della lassità cutanea (effetto lifting non invasivo):** penetra in profondità nel derma e riscalda le fibre di collagene.

Questo calore può causare contrazione temporanea delle fibre di collagene (effetto tensore immediato), stimolazione dei fibroblasti → neo-collagenesi (nuova produzione di collagene) nelle settimane successive.

**Riduzione della cellulite (effetto indiretto): non distrugge il grasso**, ma può migliorare l'aspetto della cellulite grazie ad un miglioramento del microcircolo, alla stimolazione del metabolismo locale e ad un aumento della temperatura nei tessuti con conseguente drenaggio linfatico.

**Riduzione temporanea di edema e ritenzione idrica:** la vasodilatazione locale e l'attivazione del drenaggio linfatico possono ridurre gonfiore, ristagni, edemi lievi.

Si assiste quindi ad un **miglioramento generale della Texture cutanea**

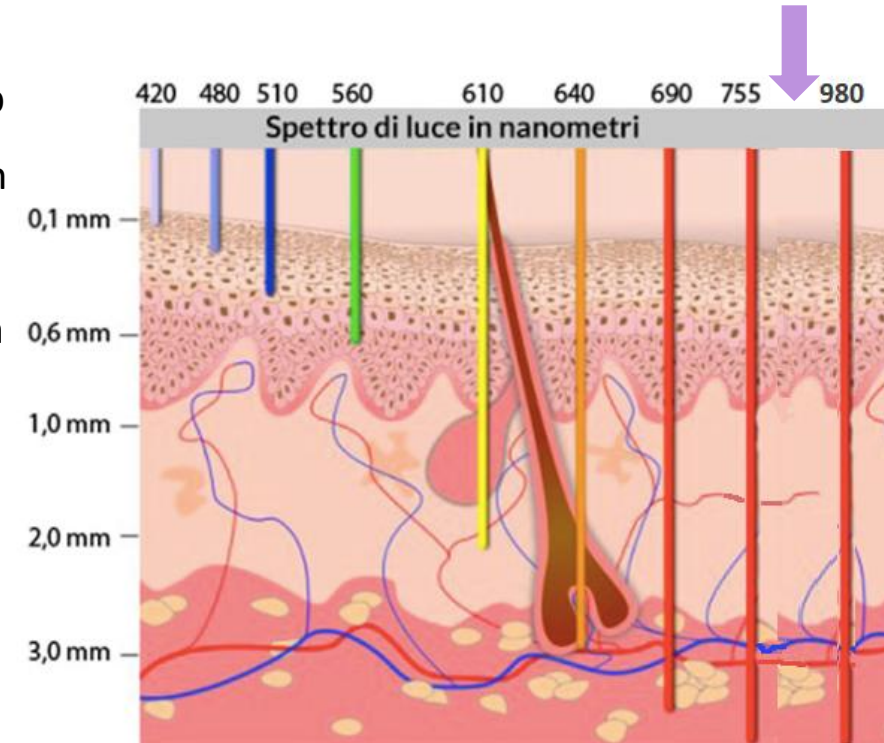



# MANIPOLI A SFERE



L'utilizzo dei manipoli a Sfere corpo e viso risultano efficaci in tutti i trattamenti di **modellamento, drenaggio e tonificazione** grazie all'azione combinata della vibrazione e del IR.

L'azione sinergica è particolarmente adatta su stati infiammatori, dolenti e tessuti molto infiltrati di liquidi.

Il corpo deve sempre essere trattato con un drenaggio completo e, solo dopo aver ridotto l'eventuale stato infiammatorio, è possibile lavorare con potenze maggiori su zone localizzate, su tessuto preparato.

**NB:** Vanno sempre effettuate le aperture dei gangli manuali



## **BENEFICI PER IL CORPO**

- Pelle più tonica e compatta
- Migliore ossigenazione dei tessuti e stimolazione della circolazione
- Aspetto più luminoso
- Sensazione di leggerezza ed energia
- Drenaggio dei liquidi in eccesso
- Migliore assorbimento dei cosmetici

## **BENEFICI PER IL VISO**


- Pelle più tonica e uniforme
- Migliore ossigenazione dei tessuti e stimolazione della circolazione
- Aspetto più luminoso e giovane
- Minimizza i segni di stanchezza
- Ravviva l'incarnato e ridefinisce i contorni del viso
- Migliore assorbimento dei cosmetici






# MANUTENZIONE MANIPOLI SFERE

Ad ogni trattamento i manipoli vanno smontati e puliti: le sfere con un panno inumidito di disinfettante o una spazzola morbida; la parte interna del manipolo con un panno asciutto perché ci sono le componenti elettriche

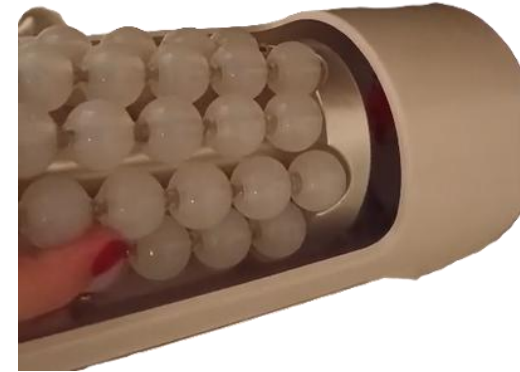

# MANIPOLO VACUUM CORPO e VISO

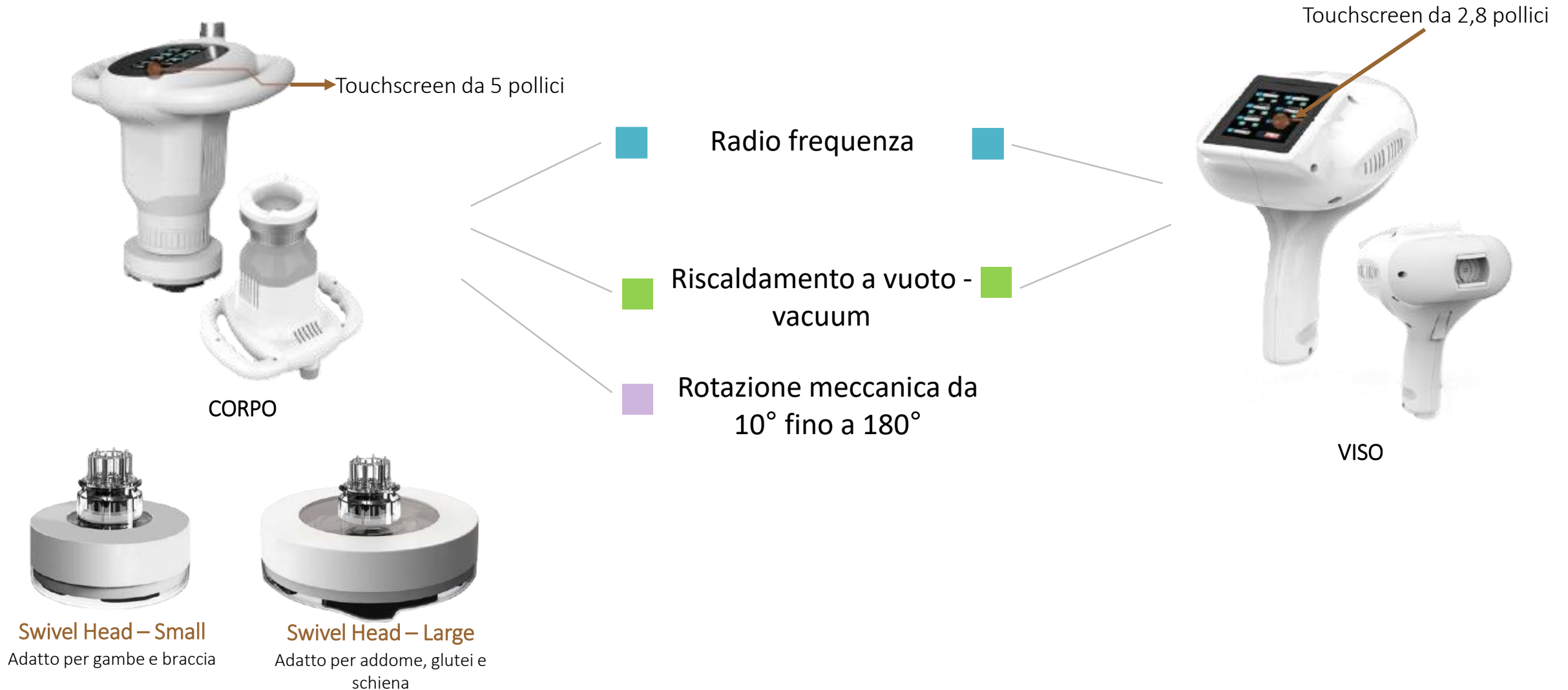

## RADIOFREQUENZA

**MECCANISMO D'AZIONE:** la radiofrequenza è una tecnica non invasiva utilizzata in medicina estetica per migliorare la qualità della pelle, ridurre i segni dell'invecchiamento e trattare la lassità cutanea. Il meccanismo d'azione della radiofrequenza si basa sulla generazione di onde elettromagnetiche ad alta frequenza (400 kHz - 3 MHz) attraverso un manipolo applicato sulla pelle. Gli effetti prodotti da questo campo elettromagnetico sono i seguenti.

### Riscaldamento dei tessuti

Le onde elettromagnetiche penetrano nella pelle e interagiscono con i tessuti ricchi di acqua e collagene.


L'attrito generato dalle molecole d'acqua produce calore controllato, che può raggiungere temperature diverse all'interno dei vari strati cutanei.

### Stimolazione del collagene

Il calore provoca la denaturazione controllata delle fibre di collagene, causando una contrazione immediata delle stesse. A lungo termine, il calore stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene ed elastina, migliorando la tonicità e l'elasticità della pelle.

### Effetti secondari e coadiuvanti sui tessuti adiposi

Nelle aree in cui vi è la presenza di adipe sottocutaneo, il riscaldamento endogeno prodotto e la migliore vascolarizzazione ed ossigenazione partecipano attivamente sullo scioglimento dei grassi.

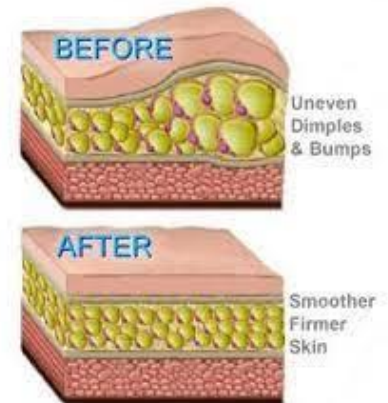

La funzione del **vacuum sinergizzata alla rotazione** dei **manipoli corpo** mima le azioni del massaggio connettivale che agisce in modo riflesso e profondo sul tessuto connettivo sottocutaneo con l'obiettivo di **migliorare la qualità dei tessuti, la circolazione e il trofismo cutaneo**

✂ **Stimolazione del sistema nervoso** (azione riflessa): le manovre agiscono sui meccanocettori e nocicettori del connettivo, lo stimolo raggiunge il sistema nervoso centrale e si attivano riflessi neurovegetativi. Effetto principale è il riequilibrio del sistema nervoso autonomo e il miglioramento della risposta vascolare. È per questo che il trattamento ha effetti a distanza, non solo locali

✂ **Azione sul tessuto connettivo**: mobilizza il connettivo sottocutaneo, riducendo: rigidità, aderenze, ispessimenti. Migliora la scorrevolezza dei piani tissutali e il tessuto diventa più elastico e reattivo

✂ **Miglioramento della microcircolazione**: stimola la vasodilatazione, aumentando l'apporto di ossigeno e nutrienti. Favorisce l'eliminazione delle scorie metaboliche. Effetto visibile: pelle più rosea ed elastica.

✂ **Stimolazione del sistema linfatico**: favorisce il drenaggio dei liquidi e riduce: ristagni, gonfiori ed edema sottocutaneo

✂ **Effetto sul metabolismo tissutale**: riattiva gli scambi cellulari, migliora il trofismo cutaneo e stimola l'attività dei fibroblasti. La pelle appare più compatta, uniforme e vitale



## VACUUM VISO

È molto usato in estetica perché **non invasivo** e perché stimola in modo naturale circolazione e drenaggio.

### EFFETTI SUL VISO

📌 **Drenaggio linfatico (riduzione gonfiore e borse):** la suzione delicata attiva il flusso linfatico, il liquido in eccesso viene mobilizzato e si assiste ad una riduzione del gonfiore al viso, ad una diminuzione delle “borse” sotto gli occhi (indirettamente, zona periculare va trattata con molta cautela) e a un miglioramento della ritenzione idrica del volto.

📌 **Miglioramento della microcircolazione (pelle più luminosa):** il vacuum aumenta l’afflusso sanguigno superficiale, donando un incarnato più rosato e uniforme, una pelle più luminosa e una migliore ossigenazione dei tessuti.

📌 **Effetto lifting leggero e tonificazione dei tessuti:** il sollevamento meccanico stimola i fibroblasti e la produzione naturale di collagene ed elastina. Questo può portare, nel tempo, ad avere una pelle più compatta, un lieve effetto rassodante e un miglioramento della lassità lieve.


📌 **Miglioramento di rughe sottili (indirettamente):** il vacuum non “riempie” la ruga, ma aumenta il flusso sanguigno e migliora elasticità e idratazione. Le rughetta superficiali possono apparire meno evidenti.

📌 **Miglioramento della qualità della pelle:** la stimolazione meccanica può favorire una migliore nutrizione dei tessuti, l’eliminazione di tossine e una pelle visivamente più sana e fresca.





# MANIPOLI CORPO

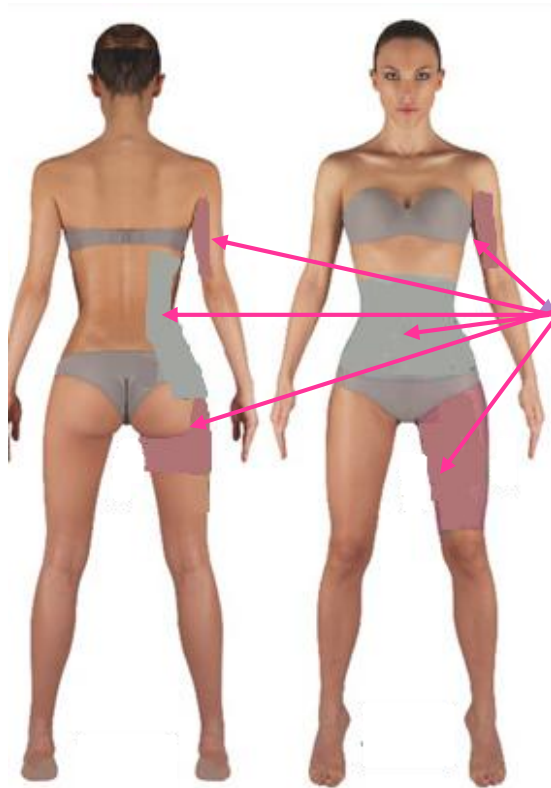

Aree trattabili

L'azione sinergica di vacuum, rotazione e radiofrequenza, utilizzati localmente, portano una serie di benefici estetici:

- Migliore elasticità della pelle
- Tessuti più morbidi e meno fibrotici
- Riduzione dell'aspetto "a buccia d'arancia"
- Migliore ossigenazione cutanea
- Pelle più tonica e levigata
- Ridefinizione dei contorni del corpo

**NB:** il manipolo va utilizzato localmente SOLO dopo aver preparato il tessuto con il manipolo a sfere e NON VA UTILIZZATO su tessuti infiammati



# MANIPOLO VISO



L'azione sinergica di vacuum e radiofrequenza permette di trattare tutti i principali inestetismi viso correlati all'avanzare dell'età

- Migliore elasticità della pelle
- Tessuti più morbidi e luminosi
- Migliore ossigenazione cutanea
- Pelle più tonica e levigata
- Diminuzione dei piccoli segni d'espressione
- Ridefinizione dei contorni del viso

# MANUTENZIONE MANIPOLI VACUUM

Ad ogni trattamento i manipoli vanno puliti con un panno inumidito di disinfettante



Dal Manipolo Corpo si smonta la testina e la si pulisce con il panno



Periodicamente, mettere una gocciolina di glicerina sull'aggancio delle testine



Per pulire meglio la griglietta al centro del Manipolo Viso, è consigliabile passare periodicamente un cotton fioc appena inumidito

Per quali  
inestetismi è  
adatta  
**ENDOTECH**  

---

**PRO**  

---

**ENDOTECH PRO**, secondo la tipologia di manipolo selezionato, è indicata per trattare in modo generalizzato o mirato e specifico tutti gli inestetismi **del corpo** nelle aree di

- Addome
- Fianchi
- Glutei
- Gambe
- Braccia

**ENDOTECH PRO** dà ottimi risultati già dalle prime sedute sugli inestetismi di

- Ritenzione idrica
- Cellulite edematosa
- Adipe localizzata
- Cellulite fibrosa localizzata
- Rilassamento cutaneo

**INOLTRE**

- Atonia e invecchiamento cutaneo del viso
- Detossinazione e drenaggio della pelle del viso

# I punti di forza di ENDOTECH PRO

La Tecnologia, dopo una formazione approfondita, è in grado di riprodurre massaggi manuali molto profondi ed efficaci, senza sforzo per l'operatore ed enfatizzarne i risultati grazie a tecnologie accessorie come IR e Radio frequenza

- I manipoli a rulli possono trattare, già da soli, sia tutto il corpo che il viso, senza sforzo per l'operatrice.
- L'aggiunta dei manipoli con massaggio vacuum, permette di trattare con successo le aree localizzate con gli inestetismi più resistenti e ostici da eliminare.